

MESOTHERAPIE-KANÜLEN UND IHRE VERWENDUNG

(Stand 11/16)

1. **Microlance 0,3 X 13 mm**: preiswerte Standardnadel für Cellulite, Haare, Schmerztherapie, Carboxytherapie. Universalkanüle für Mesotherapie per Hand, insbesondere für die epidermale Ziehtechnik, lineare oder tower Technik für HA-Filler.
2. **Microlance 0,4 X 13 mm**: preiswerte Standardnadel für Lipolyse am Körper, subcutane Infiltrationen auch größerer Volumina, z.B. in der Schmerztherapie (Mesoperfusion, Hüftgelenke, LWS) oder Carboxytherapie subcutan bei größeren Fettdepots am Körper.
3. **Mesoram 0,3 X 4 mm/ Mesorelle 0,3 X 6 mm**: klassische Meso-Kanüle für Mesolift, Schmerztherapie, Haarausfall, Cellulite, Hyperhydrosis axillae, Mesobotox, per Hand oder Gerät zu verwenden. Carboxytherapie intra- oder subcutan. Auch für gezielte Fillerapplikation, z.B. perioral, radiäre Lippenfältchen. Lipolyse im Gesicht/Halsbereich.
4. **Mesorelle 0,26 X 4 mm**: feinste Meso-Nadeln mit geringerem Durchfluss für punktuelle und epidermale Techniken bei hypersensiblen Patienten oder empfindlichen Bereichen, wie z.B. Kopf, Hände, Füße, perioral, perioculär. Wesentlich schmerzärmer. Carboxytherapie im lateralen Augenbereich.
5. **Mesorelle 0,3 X 25 mm**: feine längere Nadel für intradermale lineare Applikation von HA (z.B. Redensity I, RHA 1) in oberflächliche Fältchen (Stirn, Hals, Lippenrand). Hohe Elastizität und leichtes Gleiten im Gewebe.
6. **Mesorelle 0,4 X 25 mm**: speziell für lineare Technik für höher vernetzte HA-Filler, „windmill“ oder „fan“ Technik, größere zu unterspritzende Linien oder Bereiche. Besonders geeignet für atraumatische, schmerzfreie **im. Injektionen** bei schlanken Patienten.
7. **Mesorelle 0,4 X 40 mm**: für lineare Technik höher vernetzter HA-Filler und für **i.m** Injektionen bei größerer Fettschicht.
8. **neu! JBP Nanoneedle 0,26 X 4 mm (33G)**: japanisch-koreanische UTW (ultra thin wall) „high tech“ Kanüle für minimalen Einstichschmerz und bestmöglichen Komfort. Größerer Durchfluss als bei der Mesorelle gleicher Größe aufgrund der extrem feinen Wand. Gute Stabilität für Nappage Technik, die bevorzugte Nadel für Mesolift und Mesohair, insbesondere bei PRP Anwendung! Optimal mit Hand und Gerät einsetzbar.
9. **neu! TSK Invisible Needle 0,2 X 9 mm**: japanische “high Tech” Kanüle, Gewinner des “International Aesthetic Awards 2016”. Ermöglicht quasi schmerzfreie Infiltrationen, z.B. bei hypersensiblen Patienten, in der Schmerztherapie, bei Mesohair, Behandlung oberflächlicher Fältchen (Stirn, Mund- und Augenbereich), in der Zahnmedizin. Gute Stabilität und Durchfluss

Kanülen, passende Spritzen, elektronische Injektionsgeräte, Literatur und Arbeitshilfen sind zu bestellen bei www.mesotherapie-shop.de